



## Lydaktiveret kald

### Maksimal tryghed for plejer og patient

Det er afgørende for både patient, plejer og pårørende, at man kan skabe kontakt, når der er brug for det. Ikke alene kan det være livsnødvendigt, men den daglige tryghed og trivsel afhænger i høj grad også af sikkerheden i et kald eller en alarm.

#### Når man ikke kan bevæge sig

Visse patientgrupper har ikke mulighed for at tilkalde hjælp på traditionel vis. Derfor tilbyder Ascom Danmark lydaktiveret kaldeanlæg til for eksempel krampeanfaldsramte patienter eller patienter med andre

#### Et godt hjælpemiddel for både patient og personale

fysiske handicap. Det lydaktiverede kaldeanlæg indstilles til at opfange lyde af forskellig styrke, og vil således aktiveres ved f.eks. tale.

#### Mange anvendelsesmuligheder

Et lydaktiveret kaldeanlæg kan anvendes i mange sammenhænge. Modulerne kan monteres ved patientsenge, på stole eller i andre hospitals- og ældreplejemiljøer. Uanset placering og problemstilling er formålet altid at sikre den optimale følelse af tryghed for patienten og sikkerhed for personalet.

#### Enkel betjening og indstilling

Med to knapper indstiller man dels lydfølsomheden og dels forsinkelsen. Forsinkelsen er den tid, man ønsker, at det valgte lydniveau skal holdes, inden der afsendes en alarm. Dette sikrer, at der ikke afsendes fejlalarmeringer som følge af for eksempel et host eller en stol, der bliver flyttet eller lignende.



## Egenskaber

### Lydaktiveret kald - LAK-821HF

#### Lydsensor indbygget

Modulet har indbygget mikrofon

#### Tidsforsinkelse

Ved at indstille tidsforsinkelsen vælger man, hvor længe et lydniveau skal være aktivt, før en alarm afsendes

#### Alarmlampe

Indikerer når en alarm er aktiveret og venter på afstilling

#### Reset knap

Til nulstilling af tidsforsinkelsen. Reset knappen anvendes for eksempel, når man plejer patienten for at undgå fejl-alarmer

#### Følsomhedsregulering

Modulet opfatter regulerbare lydintervaller og afsender et kald, når det valgte niveau overskrides

#### Sensorlampe

Indikerer om det valgte lydniveau er overskredet. Tidsforsinkelsen afgør, hvor længe sensorlampen kan lyse uden at afsende et kald

#### Strømforsyning

St762-B

#### Relæudgangsluttefunktion

Relæudgang til eksternt kaldeudstyr

## Optioner

#### Ekstern mikrofon - Mi821

Ved at tilslutte en ekstern mikrofon, kan man få lydfølsomheden maksimeret. Mikrofonen fastsættes på patientens hovedpude, beklædning el.lign.

#### Trådløs overførsel af alarm

I modulet kan indbygges en UHF sender for trådløs overførsel af alarm



## Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.  
Roskildevej 342C  
DK-2630 Tåstrup  
T +45 70 20 38 83  
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.  
Ørstedvej 9  
DK-8600 Silkeborg  
T +45 70 20 38 83  
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk  
www.ascom.dk

ascom