



Sengevagt

Fremtidens afløser for trædemåtter

I mange henseender er det praktisk at kunne registrere, når en patient eller beboer forlader sit sengeleje. Der kan være tale om situationer, hvor patienten har gavn af en hjælpende hånd eller det kan betragtes som et decideret advarselssignal, når en demment eller psykisk syg person, står op for at forlade sin stue.

Øjeblikkelig advarsel

Når en patient vil forlade sit sengeleje, registreres aktiviteten øjeblikkeligt af sengevagten, som dernæst videregiver en besked til den foruddefinerede personsøger eller trådløse telefon, der skal håndtere situationen. Meldingen afsendes, inden patienten overhovedet er kommet på benene. Med en tidsstyret føler, kan man indstille bevægelsesfriheden ved sengearealet, så der skal være meget eller blot lidt aktivitet, inden en alarm afsendes.

Praktisk og nytænkende

Sengevagten ses som afløseren for de tidligere så populære trædemåtter. Hvor trædemåtten ofte er til besvær for både rengøringen, gangbesværede patienter og almindelig personaletrafik, monteres sengevagten på væggen eller direkte på sengebenet, for at være fri af gulvet. Dermed undgår man at folk snubler over trædemåtten og rengøringen kan ske helt uden besvær. Med mu-

Et godt hjælpemiddel
for både patient
og personale

lighed for trådløs opsætning har man fuldstændig frigjort sengevagten og dermed også åbnet mulighed for at relokere patienten forholdsvist enkelt.



Egenskaber

Sengevagt - SV-2000

Bevægelsessensor

Den indstillelige sensor giver mulighed for at individualisere sengevagten til den enkelte patients behov

Montering

Sengevagten kan monteres på væggen eller på sengebenet ved hjælp af medfølgende kabelstrips og skruer. Andre placeringer er også mulige afhængigt af behovet hos patienten og personalet

Stabil alarmering


Sengevagten er ikke følsom over for påvirkning fra fodtøj eller lignende, da den monteres direkte på væg eller sengeben

Tænd og sluk-funktion


Plejerpersonalet kan let tænde og slukke for sengevagten

Vridbart stik

Den robuste sengevagt tilsluttes panelet med et vridbart stik, der sikrer, at hverken stik eller panel lider overlast ved utilsigtet træk i ledningen.

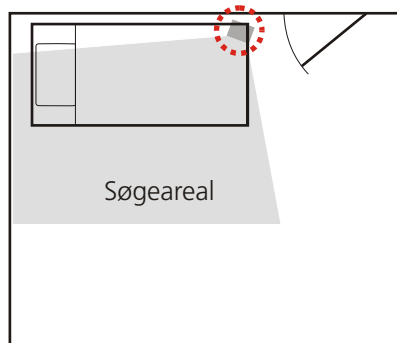

Eksempel på SV-2000 monteret under seng

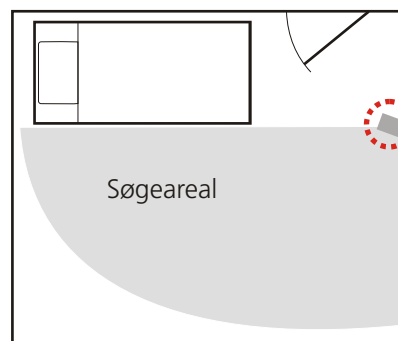

Eksempel på SV-2000 monteret på væg

Ascom Danmark A/S

Tåstrup afd.
Roskildevej 342C
DK-2630 Tåstrup
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

Silkeborg afd.
Ørstedvej 9
DK-8600 Silkeborg
T +45 70 20 38 83
F +45 70 20 38 82

info@ascom.dk
www.ascom.dk